


Quick guide

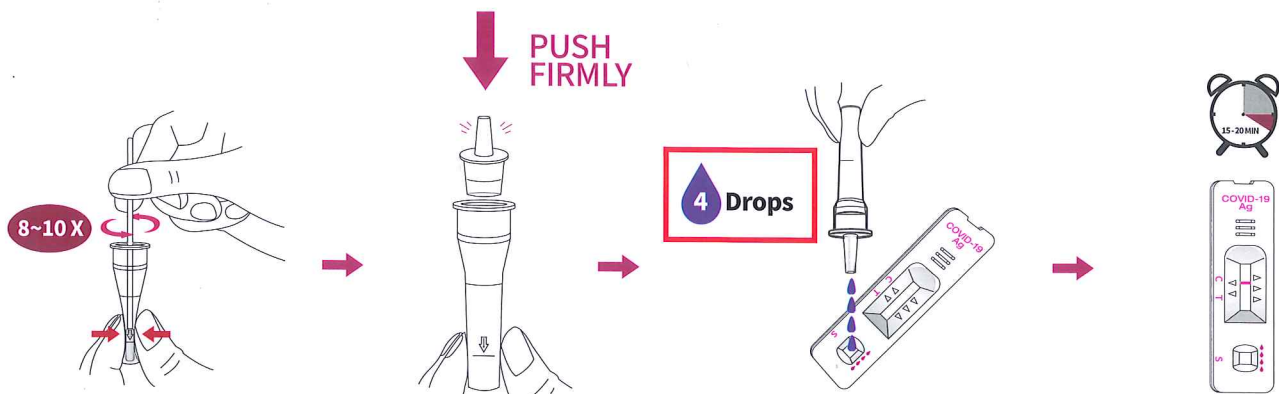

Press both sides of the tube and rotate the swab 8~10 times for squeezing it.

Ép sát hai bên thành ống nghiệm và xoay tăm bông có chứa dịch tỵ hầu từ 8-10 lần trong ống nghiệm chứa dung dịch tách chiết.

Close the filter cap

Đậy nắp lọc vào ống nghiệm.

Add ONLY 4 drops of the solution carefully into the specimen well of the device.

Nhỏ từ từ 4 giọt bằng cách bóp nhẹ nhàng dung dịch chiết mẫu vào vị trí nhỏ mẫu của khay xét nghiệm.

Read the test between 15-20 min after the addition of the sample.

Đọc kết quả trong vòng 15-20 phút sau khi nhỏ mẫu.